

NOSOCLEAR®

Agent de clătire pentru masinile automate de reprocesare a instrumentelor și echipamentelor chirurgicale.

NOSOCLEAR® este o soluție foarte concentrată, special concepută pentru uscarea rapidă și impecabilă a instrumentelor chirurgicale, a articolelor de sticlă și a altor dispozitive medicale sensibile. Poate fi utilizat pe instrumente din oțel inoxidabil, instrumente oftalmologice, echipamente anestezice, articole de sticlă de laborator, materiale plastice și cauciucuri dure.

NOSOCLEAR® reduce tensiunea superficială a apei de pe instrumente, permițându-le să se usuce rapid fără a lăsa urme.

NOSOCLEAR® poate fi utilizat la echipamente de reprocesare, a instrumentelor.

Proprietăți

- Reduce drastic timpul de uscare
- Lasă instrumentele curate și fără pete
- Foarte economic: diluare de la 0,01% până la 0,03%
- Poate fi utilizat în apă dură sau dedurizată
- Nu face spumă, previne coroziunea și decolorarea instrumentelor
- Potrivit pentru instrumente termorezistente precum și pentru cele termosensibile

Compoziție

Surfactanți neionici 15% - 20%, fosfonați, inhibitori de coroziune, regulator de pH, excipienți.

Compatibilitate

NOSOCLEAR® este compatibil cu majoritatea materialelor precum oțel inoxidabil, aluminiu, sticlă, ceramică, plastic dur, ebonit, etc.


Verificați întotdeauna, înainte de utilizare, compatibilitatea produsului cu materialele sensibile.

Certificări

- Marcajul CE în conformitate cu Directiva dispozitivelor medicale (Directiva 93/42 / CEE)
- Dispozitiv medical clasa I
- Produs înregistrat la Organizația Națională a Medicamentelor din Grecia (EOF)
- NOSOCLEAR® a fost testat conform ISO 109931 și nu este toxic

Pentru rezultate optime și pentru a asigura compatibilitatea deplină între substanțele chimice, MEDALKAN recomandă cu insistență utilizarea gamei complete de produse de reprocesare special formulate pentru fiecare etapă:

- NOSOCLEAN pentru o curățare performantă și sigură
- NEUTRALKAN pentru îndepărtarea reziduurilor alcaline și a crustelor
- NOSOCLEAR pentru o uscare extra rapidă și fără pete

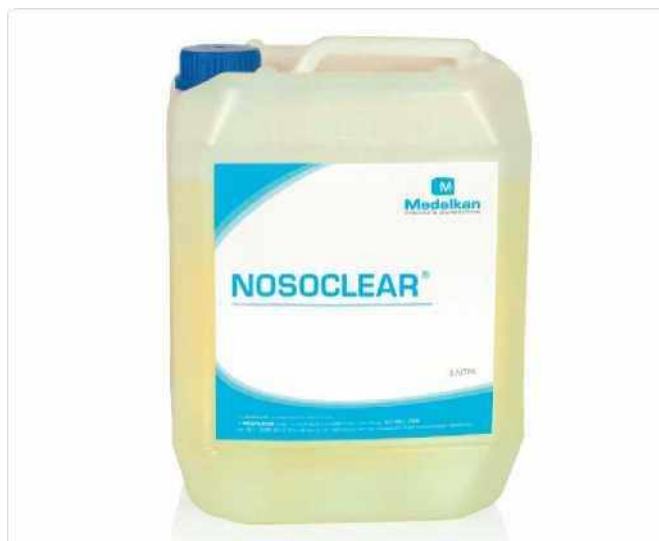

Ambalare

- Recipient de 5 litri (Ref. 20030)
- Recipient de 10 litri (Ref. 20031)

Proprietăți fizice

- Aspect: Soluție galben transparentă
- Densitate: 1.02 g/cm³ la 20°C
- pH: 6.0-7.0 la 20°C
- pH (0,2-0,8ml/l): 7.0-8.0 (neutral) la 20°C
- Viscositate: <50 mPas la 20°C
- Depozitare: 5°C - 35°C
- Stabilitate: 3 Ani
- Biodegradabilitate: Conform OCDE 301D

Instrucțiuni de utilizare:

NOSOCLEAR® se utilizează în masinile automate de spălare și dezinfectare în timpul ciclului de clătire, la o diluție de la 0,1 ml / l. (0,01%) până la 0,3 ml / l. (0,03%). Diluția depinde de calitatea și temperatura apei de clătire. Pentru cele mai bune rezultate, se preferă utilizarea apei deionizate.

Ambalajul trebuie închis bine după utilizare. Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului de spălare. Numai pentru uz profesional.

Nu amestecați cu alte produse.

Depozitați produsul între + 5 ° C și + 35 ° C.