



# ZHIVASEPT RAPID S



**Dezinfectant de contact, cu acțiune rapidă  
aplicat prin dispersie dirijată**

### **Caracteristici:**

Lichid gata de utilizare cu miros plăcut pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor rezistente la alcool.

### **Substanțe active:**

Propan -2-ol 30%, (30g/100g), CAS 67-63-0.

Propan -1-ol 45%, (45g/100g), CAS 71-23-8.

Etanol 5%, (5g/100g), CAS 67-63-0.

### **Aria de utilizare:**

Dezinfecția rapidă a suprafețelor din unitățile sanitare, cabinetele medicale de orice tip, instituții publice și de învățământ (școli, grădinițe, creșe).

Dezinfecția rapidă a suprafețelor mici și mobilierului: dispozitive medicale, mobilier, cărucioare, paturi, saltele, clanțe, mânere, telefoane, mese de lucru, etc.

Dezinfecția rapidă în secțiile de intervenție (săli de operații, saloane de reanimare, etc.), sectoare din spitale, (saloane, săli de primire și examinare urgențe), utilități comune (holuri de acces, ascensoare, săli de așteptare), dezinfecția rapidă a ambulanțelor, vehicule de transport copii și călători, etc.

### **Spectrul de activitate și timpul de acțiune:**

Aria de aplicare	Spectrul de activitate	Timpul de acțiune
Dezinfecția rapidă a suprafețelor	Bactericid, levuricid, micobactericid.	1 min.
	Virucid (Adenovirus, Murine norovirus, Vaccinia virus)	2 min.

### **Instrucțiuni de utilizare:**

Dezinfecția se face prin pulverizarea preparatului pe suprafețe și obiecte, folosind pompa pulverizatoare de pe flacon, de la o distanță de aprox. 30 cm, până la umectarea completă a suprafeței. După expirarea timpului de contact, suprafețele pot fi utilizate, fără clătire. Dacă este necesar, excesul de soluție se îndepartează cu o lavetă sau șervețel curat.

**Ambalare:** Flacoane de 750 ml dotate cu cap de pulverizare.

**AVIZ M.S.:** 4839BIO/02/12.24

[www.borero.ro](http://www.borero.ro)

DEZINFECȚIE RAPIDĂ PE BAZĂ DE ALCOOL PENTRU  
SUPRAFEȚE